

AEDトレーナー（CR-T）簡易操作マニュアル

1. 本体背部にある **A:リモコン** を取り出してください。
2. 本体右横の **B:メインスイッチ** をスライドさせて電源を入れてください。
（注意）電源は長押ししないで下さい（設定がリセットする事があります）

C:表示窓にOK が表示され、使用できる状態になります。

3. 本体手前の **D:ON/OFFスイッチ** を押してください。
フタが開き、音声ガイダンスがスタートします。
音声：「直ちに助けを呼んでください ～（途中省略）」
しっかりパッドを貼ります。

パッドを正しい位置に貼れたのを確認できたら、

リモコンのE:F 2ボタン（パッドマーク） を押します。

注意）F2ボタンを押さない限り、次のステップに進みません。

音声：「体に触れないで下さい ～（途中省略）」

F:点滅ボタン を押してください。

胸骨圧迫と人工呼吸をしてください。

（この間 2分 胸骨圧迫と人工呼吸を続けます。2分経過しますと、自動的に心電図解析に移ります。）

4. 1～4 が一連の流れになります。
説明などで一旦停止する場合は、リモコンの **G:ポーズボタン** を押します。再開する際は再度 **G:ポーズボタン** を押してください。
5. 終了する場合は、**B:メインスイッチ** をスライドさせ電源を切ります。

（注意）電源は長押ししないで下さい。

