


# AED トレーナー CR-T 「一般的なプログラム」への設定方法

(プログラム：最初に電気ショック1回・それ以降は電気ショックなしへ変更)

本体背部にあるリモコンを取り出します。

リモコンは本体背部の受光部分に向けて、ご使用ください。

リモコン左下の緑色のボタンを、本体受光部に向けて押してください。画面が青色に点等します。

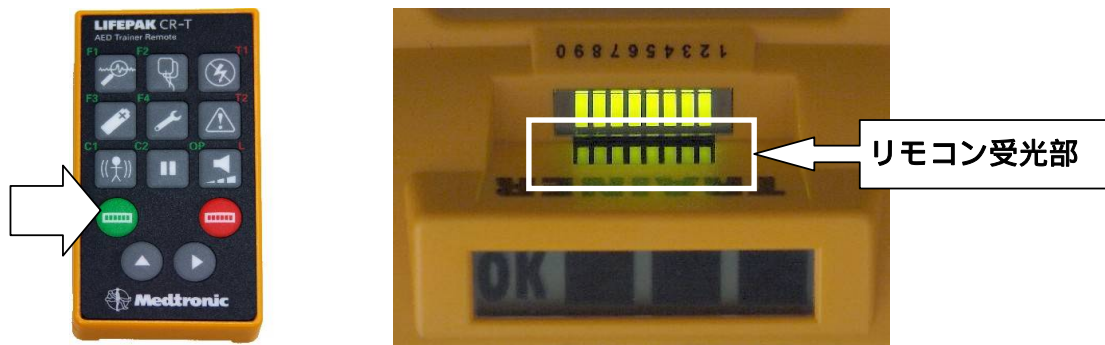

リモコン左上の[F1]ボタン（心電図マーク）を押してください。

[1]が青色、[2~4]が赤色に点灯します。



リモコン左下の緑色のボタンを押してください。

プログラム：最初に電気ショック1回・それ以降は電気ショックなしに変更完了です。

